



Menu général	
<p>1 2 3 4 5 6 7</p>	<p>1 Nouveau 5 Tableur 2 Ouvrir 6 Acquisition 3 Enregistrer 7 Afficheur numérique 4 Imprimer</p> <p><i>Commandes au clavier</i> F10 Lancer la mesure Echap : Arrêter la mesure</p>
Menu des paramètres d'acquisition	Actions et procédures
<p>Afficher la liste des courbes Retour au menu d'acquisition</p> <p>Liste des capteurs</p> <p>Superposition de courbes</p> <p>Durée de l'acquisition</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ajouter une nouvelle courbe dans un graphique déjà existant : cocher la case «Ajouter les courbes» avant de lancer la nouvelle mesure. • Modifier l'échelle : en agissant directement sur les axes avec la souris ou en double-cliquant sur les axes pour entrer un minimum et un maximum précis manuellement. • Faire une mesure précise sur le graphique : clic droit sur le graphique puis «réticule». • Ajouter un commentaire sur le graphique avec titre et texte : clic droit sur la courbe puis «Créer commentaire». Le commentaire peut être déplacé après validation. • Ajouter des flèches sur la courbe : clic droit sur la courbe puis «Créer flèche». Tracer la flèche. <p><i>Modifications éventuelles :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Retirer une courbe du graphique : clic droit sur le titre de la courbe au niveau de l'ordonnée puis «retirer». • Modifier un commentaire : double-clic sur le commentaire. • Retrouver la courbe d'origine : si la courbe d'origine est sur le graphique mais qu'elle a été perdue en changeant les échelles, faire un double clic sur son nom (titre des ordonnées) dans la fenêtre du graphique pour la calibrer de nouveau.